



Kurzanleitung Schnelltest CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self Test

- Schritt 1: **Verpackung** mit dem Teststäbchen **öffnen**. Teststäbchen am Ende festhalten und aus der Verpackung ziehen. Tupferspitze nicht berühren.
- Schritt 2: Teststäbchen in das **linke Nasenloch** 2 – 4cm tief einführen. Die gesamte Tupferspitze befindet sich im Nasenloch. Bei einem Widerstand ist sofort STOPP!
- Schritt 3: Das Teststäbchen vorsichtig mindestens 5x gegen die Innenseite des Nasenlochs rollen.
- Schritt 4: Diesen Vorgang im **rechten Nasenloch** wiederholen.
- Schritt 5: Das Teststäbchen aus dem Nasenloch entnehmen und **in das vorbereitete Röhrchen stellen**.
- Schritt 6: **Gut mischen**, indem das Teststäbchen mindestens 6x mit den Fingern gedreht wird und der Tupfer gegen den Boden und die Seiten des Röhrchens gedrückt wird.
- Schritt 7: Das Teststäbchen **1 Minute im Röhrchen lassen**.
- Schritt 8: Das Röhrchen mehrmals von außen mit den Fingern zusammendrücken und anschließend den Tupfer entsorgen.
- Schritt 9: Die **Verschlusskappe fest auf das Röhrchen drücken**.
- Schritt 10: **4 Tropfen der Probenlösung in das vorgesehene Feld der „Testkassette“ geben**, indem man das Röhrchen vorsichtig am hinteren Ende zusammendrückt.

Jetzt heißt es Timer starten und 15 min warten
– dann liest die Lehrerin das Ergebnis ab!